

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff


Elegancia funcional en los cuidados



hospitel

Camas especiales



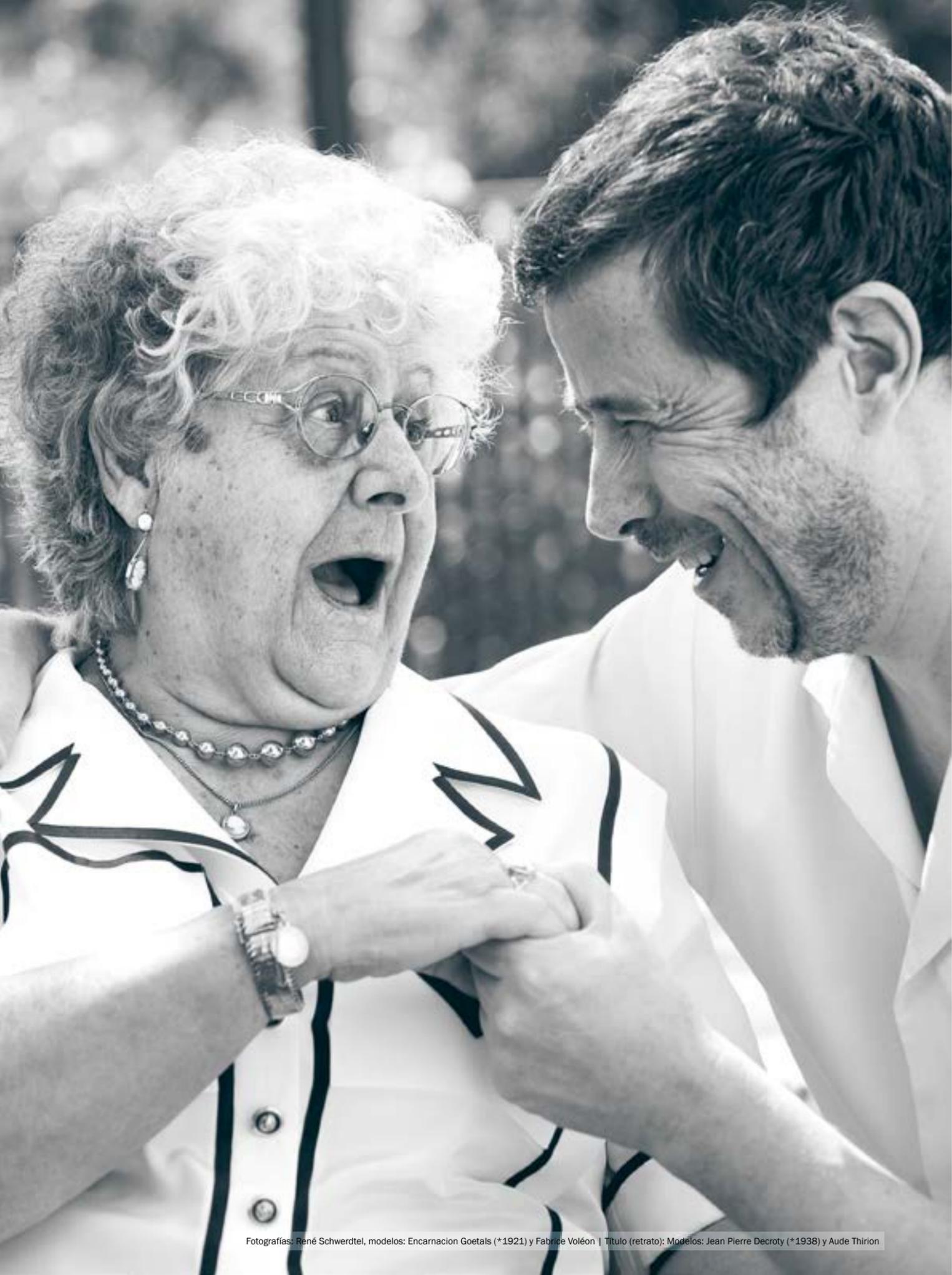

El concepto «hospitel»

Mucho más que una cama para cuidados o una cama de hospital: hospital + hotel = hospitel

El concepto «hospitel» combina espíritu acogedor, comodidad y multifuncionalidad. Su campo de aplicación no es tanto la prestación de asistencia sanitaria en fases agudas en un hospital, sino principalmente los cuidados posteriores a la fase aguda de pacientes en ámbitos tales como:

- Psiquiatría
- Cuidados de larga duración
- Geriatría
- Ortopedia
- Rehabilitación
- Cirugía plástica

Las opciones y los accesorios adicionales protegen por igual al personal y a los pacientes, principalmente en los centros psiquiátricos y en los casos de pacientes inquietos.



Resumen de las ventajas para usted:

- Diseño acogedor para una rápida recuperación («healing environment»)
- Protecciones laterales para una mejor movilización: sin hueco central de gran tamaño, elementos verticales ni rieles
- Limpieza sencilla gracias a las superficies de plástico
- Eliminación del riesgo de infección cruzada gracias a la solución abatible para el cabecero + protección lateral sin protector
- Funciones automáticas: posición de Fowler (Cardiac Chair) y elevación de piernas eléctrica
- Mecanismo para posición CPR accionable con una sola mano desde ambos lados
- Extensión de la cama con una sola mano
- Sistema «BiNetic-Frame» para prevenir la aparición de escaras y sistema ergonómico de posición de asiento confortable:

La idea de comodidad «hospital»



En la selección de materiales y colores se está volviendo a las tendencias del hogar naturales y actuales. Como resultado se crea un ambiente cálido y acogedor donde los pacientes se sienten guarecidos y protegidos. El concepto «healing environment» favorece la rápida recuperación del paciente.



Cama baja de cuidados «sentida 6», diseño A10



Mesa de noche «vivo E2T»



Motivo decorativo:
madera de cerezo

hospital | funcionalidad y comodidad

01

Concepto de protección lateral patentado SafeFree®

Copiada a menudo pero siempre sin éxito: nuestra aportación a la reducción de las fijaciones según la práctica «Werdenfelser Weg»* y el proyecto Redufix**

- Protección lateral dividida, ajustable a 4 alturas, respectivamente
- Sin elementos verticales en la zona central ni peligrosos huecos

02

Sistema estratégico de 3 paradas***

para la regulación de la altura:

- Prevención del riesgo de caídas al dormir a una altura de cama de 27 cm
- Movilización segura a la altura de asiento con una altura de cama de 41 cm
- Posición para cuidados óptima a una altura de cama de 80 cm

03

Superficie de reposo «BiNetic»

con doble desplazamiento: Auténtica prevención de escaras: más que un simple respaldo conforme a la Asociación Alemana de Enfermería (DBfK)

- Ventajas: reducción de la presión en la zona pelviana así como de las fuerzas de fricción y cizallamiento mediante desplazamiento del reposapiernas de 6 cm
- Desplazamiento del respaldo de 11 cm conforme a la Asociación Alemana de Enfermería (DBfK)

04

Mando de diseño

Funcionalidad mejorada y ampliada

- 3 niveles de seguridad ajustables: modo de cuidados, modo de paciente y modo de seguridad
- 2 posiciones automáticas: posición de asiento confortable y sistema automático de prevención
- Función de movilización
- Control de la iluminación nocturna
- Desplazamiento por separado del reposapiernas
- Bloqueo del teclado



¡NOVEDAD!

Ahora también disponible con superficies antimicrobianas.



05

Función de luz nocturna

De forma opcional se puede integrar una luz nocturna.

- Facilita la orientación por la noche
- Más seguridad para los pacientes
- Control sencillo del suministro eléctrico
- Control por medio del mando

06

Movilidad de «sentida 6» (fig.)

- Posibilidad de elegir ruedas ligeras de 100 mm «Decora», de 125/150 mm «Cover Design» o ruedas dobles de 125 mm «LINEA» (v. fig.)
- Transporte sin problemas también fuera de la habitación del paciente
- Barra de freno central (al pie de la cama) con bloqueo de dirección integrado
- Bloqueo central de las 4 ruedas

Datos técnicos*

- Regulación en altura: 27-80 cm
- Carga segura de trabajo: 225 kg

El equipamiento de «hospital» también se puede combinar con:



movita

movita casa

carisma

sentida 1, 3, 4


sentida 5

* Más información en: www.leitlinie-fem.de/werdenfelser-weg/materialien/ / ** www.redufix.de
 *** Los valores de altura del sistema estratégico de 3 paradas son válidos para los modelos «sentida 5» y «sentida 6» con ruedas de 100 mm.

3 longitudes de cama | sistema estratégico de 3 paradas

200 cm

Longitud de la cama: 200 cm.
Las protecciones laterales divididas ofrecen protección sin hueco central > 318 mm* ni protector

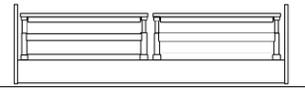

220 cm

Extensión de la cama hasta 220 cm: se puede instalar temporalmente en «sentida» con protecciones laterales divididas. Protección total garantizada mediante el protector situado en el pie de la cama (accesorio)



210 cm

Longitud alternativa de la cama
210 cm: protección con protecciones laterales más largas al pie de la cama sin accesorios ni hueco central > 318 mm**



3 longitudes de cama sin hueco central > 318 mm ni elementos verticales en la zona central

Todas las camas de wissner-bosserhoff vienen de serie con la función de extensión de la cama integrada. La opción de **extensión inmediata de la cama** (v. fig. inf.; opción) permite adaptar con flexibilidad y sin herramientas la cama «sentida» con **protecciones laterales divididas** a distintas longitudes. Asimismo, cada una de las configuraciones de la cama cumple los requisitos de la nueva norma IEC 60601-2-52.

Sistema estratégico de 3 paradas: descanso, movilización y cuidados más seguros

«sentida 6» no solo presenta un amplio **intervalo para la regulación de altura comprendido entre 27 y 80 cm**, sino que además cuenta con una protección contra los golpes al cambiar a la posición de asiento confortable gracias a un sistema inteligente de sensores de control. Esto se muestra como una gran ventaja especialmente en combinación con la extensión de la cama de hasta 220 cm.

IVS = Sistema de verticalización inteligente:

- Cómoda zona de ajuste de 27 a 80 cm
- Primera posición de parada intermedia para bajar de la cama a una altura de asiento de 41 cm
- Protección contra los golpes al pasar de la posición baja a la de asiento confortable y mediante la extensión de la cama

27 cm

Prevención del riesgo de caídas al dormir



41 cm

Movilización segura a altura de asiento



80 cm

Posición para cuidados óptima



SafeFree®

El concepto de protección lateral patentado para libertad de movimientos y movilización

4 protecciones laterales

1

Con las protecciones laterales divididas bajadas, la cama presenta un diseño acogedor y el personal asistencial disfruta de un cómodo acceso para los cuidados diarios del paciente, para el cambio de vendajes o para hacer la cama. No es necesario retirar y guardar molestos accesorios como los elementos verticales en la zona central o las barandillas laterales fijas.

4 niveles de extracción

Sin necesidad de protección



4 ventajas

Sin barreras

Sin elementos verticales, sin protector para el hueco central



2

Para ofrecer la seguridad necesaria por la noche, suele ser suficiente con combinar la posición baja de la cama con el primer nivel de extracción de la protección del cabecero. Este tipo de protección parcial evita barreras innecesarias y reduce eficazmente el riesgo de caída. Las protecciones laterales ofrecen orientación sin reducir la libertad de movimiento del paciente.

Protección parcial sin FEM



Orientación

en lugar de medidas que restan libertad (FEM)



3


El elemento de protección 3/4 presenta un hueco al pie de la cama diseñado expresamente para subirse con el fin de reducir medidas que restan libertad (FEM) a la vez que se cumplen los estrictos requisitos de seguridad. Al adaptar la altura de la cama junto con la altura de las protecciones laterales, «sentida» se adapta a la estatura de cada paciente.

Protección 3/4 sin FEM



Movilización

con adaptación a la estatura del paciente

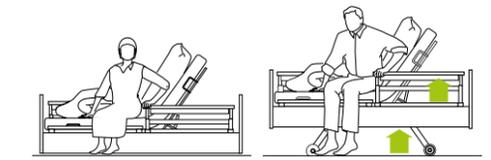

4

El tercer nivel de ajuste ofrece una protección total para el paciente. En la posición superior, las dos partes de la protección lateral se cierran y ofrecen un sistema tan compacto y seguro como el de las barandillas laterales continuas. No es necesario guardar los accesorios para cerrar el hueco central con la fijación de correas abdominales.

Protección total con colchones de 12-18 cm



Seguridad

más allá de la nueva norma IEC 60601-2-52



SafeSense*

Seguridad + libertad de día y de noche gracias a un sistema de sensores de salida de la cama inteligente

wissner-bosserhoff, su socio de confianza a la hora de reducir las medidas que restan libertad (FEM); Con SafeSense, wissner-bosserhoff presenta un sistema de asistencia con sensores inteligentes que favorece la reducción fiable de FEM de día y de noche. Está equipado con un sistema automático de luz nocturna que se activa al bajar de la cama y se apaga cuando el paciente se acuesta de nuevo. SafeSense es compatible con los sistemas de aviso remoto al personal asistencial habituales del mercado y se puede instalar a posteriori en las camas de wissner-bosserhoff desde 2002.



Más seguridad –
Menos FEM**

- Tiempo de reacción más rápido en caso de caídas
- Mayor grado de seguridad para los turnos de noche y de fin de semana
- Ideal si se combina con las camas bajas «sentida» y las protecciones laterales SafeFree®

Sistema automático de luz nocturna

- La luz nocturna se activa automáticamente al bajar de la cama
- La luz nocturna se apaga cuando el paciente se acuesta de nuevo en la cama



Sistema de alarma individualizado

- Regulación flexible y continua de alarma inmediata desde 0 segundos hasta 30 minutos
- Adaptación a la movilidad del paciente

Integrado o como kit de componentes adicionales

- Accesorios opcionales para las camas de cuidados WIBO actuales
- Kit de componentes adicionales para las camas de cuidados eléctricas de WIBO desde 2002
- Disponibles soluciones con cable o inalámbricas



Las funciones adicionales de «hospital»

En comparación con la gama estándar, la serie «hospital» ofrece funciones adicionales



«Plug & Play»

El mando se puede conectar a cualquiera de los enchufes que están instalados en ambos lados de la cama, en el lado izquierdo y en el derecho, o incluso se puede desenchufar y retirar de la cama, si es necesario, para evitar que el paciente se lesione.



Soporte para correas de sujeción

Los soportes para correas de sujeción que están instalados en el respaldo, el reposamuslos y el asiento proporcionan una solución estable y de fácil acceso para colocar las correas de sujeción.



Tubo termorretráctil

Un tubo termorretráctil que mantiene bien sujeto el cable de red evita la torsión del cable y garantiza así una mayor seguridad para el paciente, puesto que evita el riesgo de estrangularse con el cable.



Protección de pared 3D

Los protectores de pared 3D protegen de forma eficaz las paredes, horizontalmente en caso de contacto durante las maniobras con las camas y en vertical por el ajuste de la altura.




Posición CPR

La función de descenso de emergencia del respaldo que se activa desde el cabecero asegura que la superficie de reposo pueda ajustarse rápidamente a una posición recta en situaciones de emergencia, incluso en caso de haberse cortado la corriente.

Frenos bloqueables (sin ilustración)

Con frecuencia, las camas de los centros psiquiátricos deben permanecer inmóviles, de modo que ni el personal ni los propios pacientes las puedan mover. Mediante el bloqueo de los frenos, es posible asegurarlas. (disponible para «sentida» 5/6 y «carisma»).

para su uso en la atención posterior a la fase aguda o en los centros psiquiátricos.

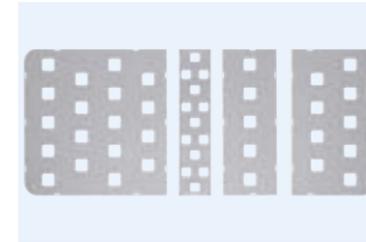

Superficie de reposo fija

En el caso de los pacientes especialmente agresivos, adicionalmente es posible fijar los elementos de la superficie de reposo al marco de la cama para evitar que los extraigan.



Cabecero/Pie abatibles

El cabecero y el pie son abatibles para asegurar al personal asistencial un mejor acceso al paciente en caso de emergencia. Además, esta característica evita que se produzcan infecciones cruzadas.



Barra de protección contra impactos

Los protectores laterales con listones de protección lateral evitan que la cama sufra daños durante el uso de elevadores o accesorios similares.



Extensión de la cama con sistema de accionamiento inmediato

La opción de extensión inmediata de la cama permite adaptar con flexibilidad y sin herramientas las camas «hospital» con protecciones laterales divididas a distintas longitudes (210 o 220 cm)



Acolchado para barandillas laterales

Las protecciones laterales acolchadas protegen tanto al paciente como la cama. El riesgo de lesiones en los pacientes inquietos provocadas por las protecciones laterales levantadas se reduce así de manera efectiva.

Pack de baterías (sin ilustración)


Gracias a la batería que está incorporada en el motor, las funciones eléctricas de ajuste de la cama se pueden seguir controlando incluso si se produce un corte de corriente o durante el transporte. Esta característica facilita la independencia y, por lo tanto, mejora la seguridad.

La idea de comodidad «hospitel»

El cabecero y el pie, así como los largueros de las protecciones laterales, están redondeados con el fin de reducir en gran medida el riesgo de lesiones en los pacientes agitados e inquietos. Las patas exteriores del cabecero y del pie proporcionan una estabilidad especialmente alta.



Diseño | Colores | Motivos decorativos*

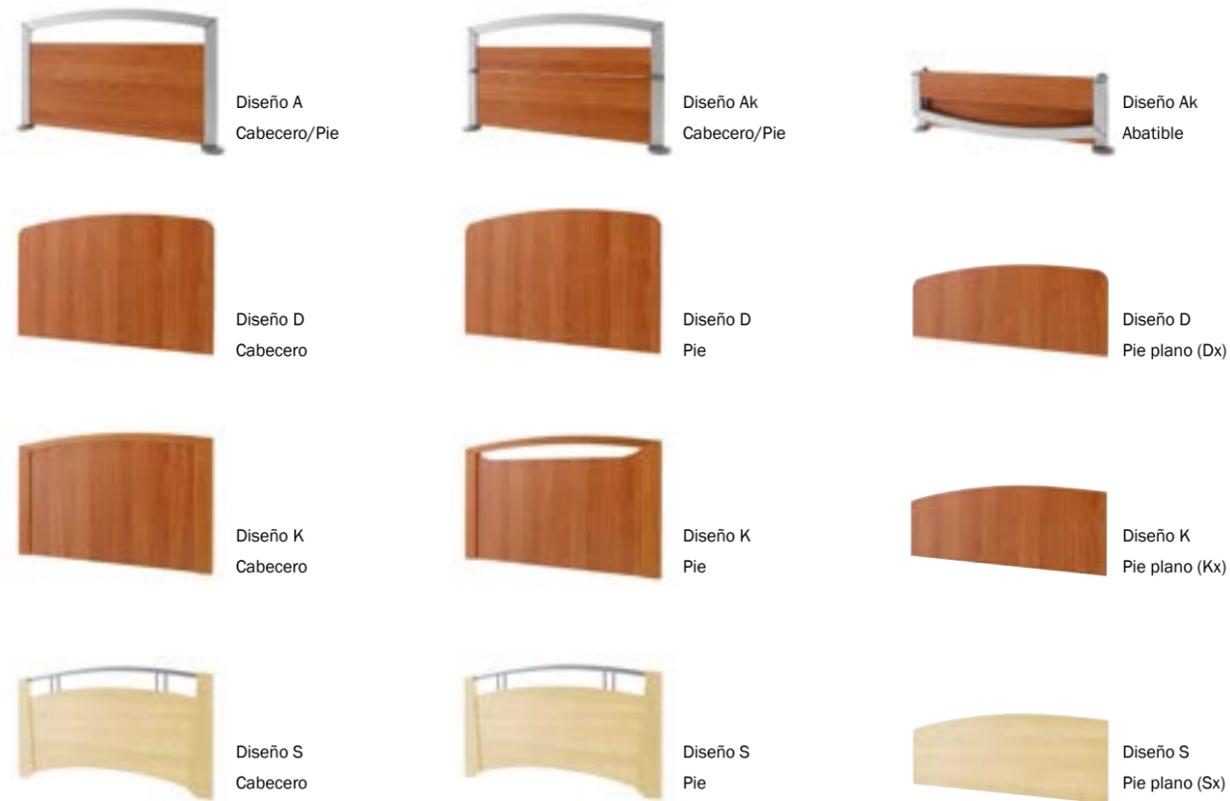

Nuestros certificados: su seguridad

wissner-bosserhoff somete voluntariamente sus procesos de fabricación y su sistema de administración a auditorías periódicas por parte del TÜV. La empresa cuenta con la certificación conforme a la norma DIN EN ISO 9001:2008 sobre sistemas de gestión de calidad y conforme a la norma DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 sobre la fabricación de productos médicos.




Sello de homologación para la certificación y auditorías del producto

Equipamiento y accesorios


Para adaptarse al concepto cromático de los hospitales, las camas para cuidados prolongados y rehabilitación presentan un concepto de colores ampliado con los adornos y los pasamanos en colores lisos y diseño «silverline».



Medidas

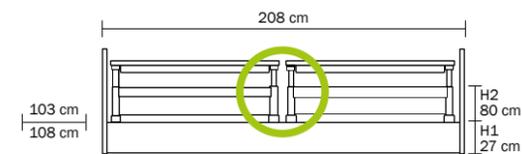


«sentida 6» con protecciones laterales divididas (10), sin huecos
 Dimensiones exteriores: L = 208 cm, An = 103/108 cm
 Medidas del colchón: L = 200 cm, An = 87 cm
 H1 = 25 cm (posición baja), H2 = 80 cm (posición más alta)

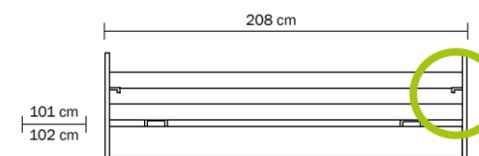


«sentida» con protecciones laterales dobles continuas (09) con dispositivo de activación de pistola

Superficies de reposo

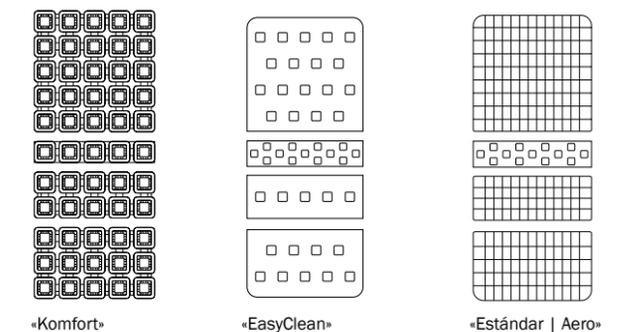


Equipamiento y accesorios


Extensiones de la cama

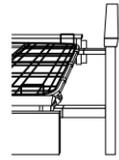


Extensión de cama temporal
Protección lateral 10 (estándar)

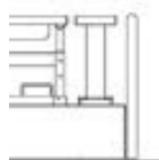


Extensión de cama permanente
Protección lateral 10 (opción)

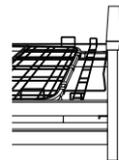

Extensión de cama permanente
Protección lateral 09 (opción)

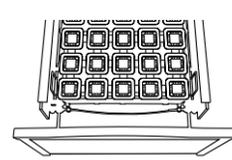

Extensión de la cama con sistema de accionamiento inmediato (opción)

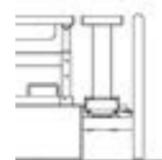

10-0570 / 10-0580
Protector para extensión de la cama en 20 cm (opción)

Opciones




Ruedas verticales para protección de pared



Ruedas para protección de pared 3D de efecto horizontal y vertical



Sistema de accionamiento CPR en el respaldo

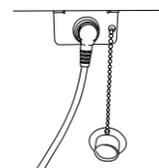

«Plug & Play» para la utilización del mando a un lado o a los dos lados de la cama




«D-Box» con conexión de luz para una disposición óptima de los cables




Iluminación bajo la cama (se puede encender)


Accesorios SafeSense

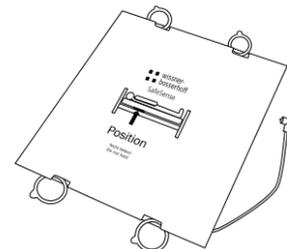

02-000712
Colchoneta de 50 x 50 cm con sensor para el respaldo

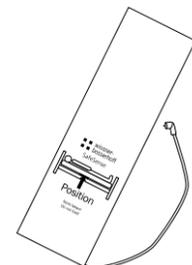


02-000713
Colchoneta de 80 x 20 cm con sensor para el asiento

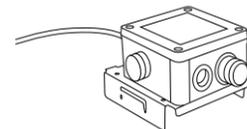


Solución con cable:
04-1544-001 Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas sin batería
04-1544-004 Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas con batería

Solución inalámbrica:
04-1544-002 Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas sin batería
04-1544-003 Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas con batería

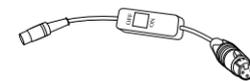


04-1508
Cable adaptador con enchufe adecuado para la conexión al dispositivo de aviso (específico del cliente)

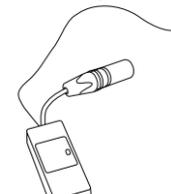


02-000726
Receptor de ondas de radio (solo para la solución inalámbrica)


Accesorios

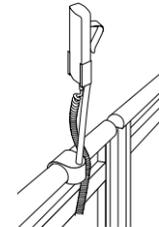


10-0419
Soporte de mando para protecciones laterales divididas
10-0421
Soporte para mando, corto

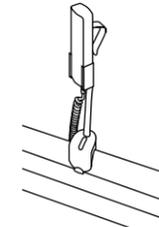


10-0422
Soporte de accesorios y del mando para protecciones laterales continuas
10-0421
Soporte para mando, corto

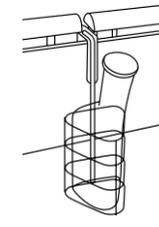

10-0424
Soporte de accesorios y del control manual para colocar en el costado
50-0165 Soporte para botella de orina
50-0164 Soporte para bolsa de orina (sin ilustración)

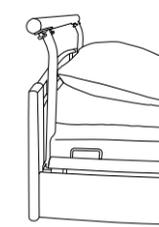

10-0534
Elemento de sujeción para el transporte «EasyMove»

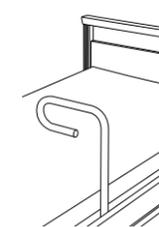


10-0715
Elemento auxiliar para protecciones laterales 09 y 10, así como protecciones laterales 3/4



50-0212 Lámpara halógena de diseño «soluna» con transformador de 12 V
50-0213 Lámpara halógena de diseño «soluna» sin transformador de 12 V
50-0237 Lámpara LED de diseño «soluna» con fuente de alimentación
50-0550 Lámpara LED de diseño «soluna» sin fuente de alimentación




50-0206
Colchoneta
An 90 x L 200 cm, Al 4,5 cm aprox.

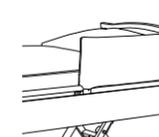


50-0174
Acolchado para protecciones laterales divididas 10




50-0338
Acolchado para protecciones laterales dobles 09

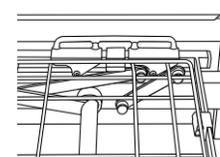


10-0563/10-0533/10-0521
Soporte «Segufix»
- para reposamuslos
- para el respaldo
- para el asiento

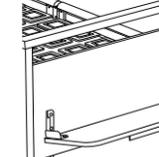

10-0719
Bandeja para ropa de cama compatible con todas las camas

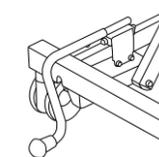

10-0707
Distanciador de pared para el cabecero corto (solo «sentida 5» y «sentida 6»)

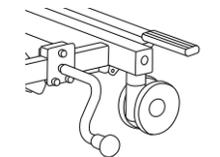

10-0708
Distanciador de pared lateral corto (solo «sentida 5» y «sentida 6»)



Elegancia funcional en los cuidados

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6

D-58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377/784-0

Fax: +49(0)2377/784-163

E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff España S.L.

Isla Graciosa 3

E-28703 San Sebastián de los Reyes

Madrid

Tel.: +34 915 757 668

E-Mail: info@wi-bo.es

www.wi-bo.es